

NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ I.V. KANYLA S KATÉREM PTFE/FEP/PUMEX

POUŽITÝ MATERIÁL

PTFE nebo FEP nebo PUR, polypropylen, polyethylen, polyoxymethylen, silikonová pryž, nerez ocel, polykarbonát a K-pryskyřice

INDIKACE

- Infuze kapalin jako jsou roztoky, parenterální výživa nebo podávání jiných léků.
- Udržování hydratace a/nebo odstraňování dehydratace u pacientů, kteří nejsou schopni perorálně přijímat dostatek tekutin.
- Transfuze krve nebo krevních součástí.

KONTRAINDIKACE

- Podávání viskozních kapalin.
- Krevní transfuze velkého objemu.
- Nepoužívat u pacientů se známou přecitlivělostí na některý z použitých materiálů.


POKYNY K POUŽÍVÁNÍ:

1. Vyberte si I.V. kanylu vhodné velikosti. Vždy používejte co nejmenší možnou kanylu potřebnou ke správnému I.V. podání požadovaných tekutin.
 2. Pečlivě vyberte a proveďte důkladnou dezinfekci místa vpichu do žíly.
 3. Zkontrolujte, zda je obal kanyly neporušený a zda datum spotřeby není prošlé, a pak vyjměte kanylu z obalu.
 4. Sejměte kryt jehly a uchopte ji za tělo kanyly.
 5. Vpichnete kanylu do žíly pod ostrým úhlem a ve zpětné komoře zkontrolujte, zda vytéká krev, což je známkou správného propíchnutí žíly.
 6. Zasuňte katétr do žíly a současně plynulým pohybem vytahujte jehlu rovnoběžně s úrovní pokožky. Důrazně doporučujeme tělem kanyly při vytahování nijak neotáčet (po směru ani proti směru hodinových ručiček).
 7. Koncová bezpečnostní zátkapka automaticky zakryje hrot jehly.
 8. Nedotýkejte se bezpečnostní zátkapky holou rukou.
 9. Jehlu ihned vyhodte do nádoby na ostrý odpad.
 10. Zabraňte krvácení tak, že přitlačíte prst na žílu v místě konce katétru nebo nad ním.
 11. Namísto jehly vsuňte buď I.V. infuzní sadu nebo Luer-Lock koncovku.
 12. Přilepte křídelka kanyly pacientovi ke kůži.
 13. Zakryjte místo vpichu sterilním obvazem/háplasti.
 14. Léky je možno podávat dle potřeby (s přestávkami) stříkačkou přes injekční port po sejmutí uzávěru.
 15. Pokud se kanyla nepoužívá, měl by být na injekčním portu vždy nasazen uzávěr.
 16. Pravidelně kontrolujte místo vpichu, zda se neobjevila nějaká reakce, a provádějte též kontrolu všech spojení.
- POZN.:** Body 12, 14 a 15 se vztahují pouze k I.V. kanyle s injekčním portem a křídelky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:






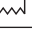







- Před použitím si přečtěte návod. Tento výrobek by měl být používán v souladu s návodem k použití.
- Před použitím zkontrolujte neporušenost výrobku i jeho obalu a také datum spotřeby.
- Nepoužívejte v místě vsunutí nebo v jeho blízkosti nůžky nebo jiné ostré nástroje, protože by mohlo dojít k poškození nebo odstrižení katétru.
- Nezaťlačte ani nevytahujte katétr nepřiměřenou silou ani jej neohýbejte, neboť by mohlo dojít k jeho poškození nebo oddělení od těla kanyly.
- Nevstříkujte do injekčního portu žádné viskozní kapaliny (platí pouze pro I.V. kanylu s injekčním portem)
- Po otevření jednotlivého blistového obalu výrobek ihned použijte.
- Nepokoušejte se do místa vpichu opakovaně vsunout částečně nebo zcela vytaženou jehlu.
- Nepoužívat, pokud je obal otevřen nebo poškozen.
- Tento výrobek by měli používat pouze řádně kvalifikovaní zdravotníci pracovníci.
- Neprovádějte opakovanou sterilizaci. Po každém jednotlivém použití celou sadu vyhodte.
- Při opakovaném použití čištění výrobku může dojít ke změně jeho strukturálních a mechanických vlastností, což by mohlo způsobit infekci nebo jiné onemocnění či poranění.
- Výměnu a likvidaci výrobku je třeba provádět v souladu s příslušným schváleným protokolem daného zařízení nebo s platnými hygienickými předpisy.
- Společnost Poly Medicure Limited neodpovídá za jakékoli přímé, náhodné či následné škody vzniklé v důsledku opakovaného použití výrobku.

POLY MEDICURE LIMITED
 Plot No. 115-116, Sector 59, HSIIDC Indl. Area,
 Ballabgarh, Faridabad, Haryana 121004, INDIA
 Customer Care No. : +91-129-4287053
 E-mail : customercare@polymedicure.com
 Web : www.polymedicure.com

 Dovoze: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
 Sídlo: Juáreзова 17, 160 00 Praha 6
 Office: Novodvorská 136, 142 00 Praha 4
 Česká republika




EC REP Obelis s.a.,
 Boulevard Général Wahis 53,
 1030, Brussels, BELGIUM.
 Tel : +(32) 2. 732.59.54
 E-mail : mail@obelis.net

-  Pozor
-  Čtěte návod k použití
- REF** Katalogové číslo
-  Nepoužívat opětovně
-  Neprovádět opětovnou sterilizaci
-  Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno
- LOT** Číslo šarže
-  Datum výroby
-  Použití do data
- STERILE EO** Sterilizováno ethylenoxidem
-  Systém jednoduché sterilní bariéry
- EC REP** Zplnomocněný zástupce v EU
-  Výrobce
-  Apyrogenní
-  Skladovací stav 5°C - 35°C
-  Chraňte před slunečním zářením
-  Udržujte v suchu
- MD** Zdravotnický prostředek

Rev. 00-23/06

Note : IFU will be put inside the duplex box

Doc. No. PROMED/001-I	Date : 13-06-23	Design by	Checked by	Approved by
IFU Design of IVC Safety - All Variants	Size : 180x130mm	Designer	QA Person	QA Incharge
	P. Area :			
Color Break	Specifications :	Issue No. 01	Scale : 1:1	Sheet 1 of 1
	1.			
Black	2.	Remarks	Date of Amdt.	
Rev.	Amendment			
1.				
2.				
3.				
4.				