

# POLYSPIKE

## NÁVOD K POUŽITÍ

### POUŽITÝ MATERIÁL:

- Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), polypropylen, PTFE membrána (na vzduchový filtr), PET (na filtr kapaliny), kopolymer ETT (na aspirační trn pro podávání chemoterapie), barvivo, polykarbonát a silikon (na šroubovací ventil).

### INDIKACE:

- Bezjehlový přístup pro použití s jednou lahvičkou a odebrání několika dávek, maximalizace objemu tekutiny získatelné z jedné lahvičky.

### KONTRAINDIKACE:

- Nepoužívat u pacientů se známou přecitlivělostí na jakýkoliv z použitých materiálů.


### POKYNY K POUŽITÍ:

- Otřete lahvičku dezinfekčním roztokem a nechte uschnout.
- Sejměte ochranný kryt z hrotu.
- Přidržte aspirační trn a hrot zasuněte do středu lahvičky/nádoby tak, aby lahvička/nádoba stála na rovném a pevném povrchu (viz Obr. 1).
- Dbejte na to, aby byl hrot zasouván vertikálně, nikoli šikmo nebo pod úhlem.
- Pomocí sterilního roztoku obsahujícího alkohol otřete povrch ventilu a nechte uschnout. (Pouze v případě šroubovacích ventilů)
- Krouživým pohybem silně zatlačte na stříkačku tak, aby se spojila s aspiračním hrotem.
  - Připojte stříkačku k druhému konci aspiračního trnu (viz Obr. 2–A pro aspirační trn Polyspike se zacvakávacím krytem)
  - Připojte stříkačku k druhému konci aspiračního trnu (viz Obr. 2–B pro aspirační trn Polyspike se šroubovacím ventilem)
- Otočte lahvičku a odeberte požadované množství roztoku (viz Obr. 3).
- Odpojte stříkačku od lahvičky (viz Obr. 4).


### UPOZORNĚNÍ:

- Nevstříkujte kapalinu, dokud je lahvička otočena dnem vzhůru.
- Nezasouvejte hrot pod úhlem nebo šikmo.
- Při zasouvání hrotu do lahvičky nedržte průduch.
- Nedržte hrot, když je lahvička otočena dnem vzhůru bez stříkačky.
- Aby nedošlo k poškození ventilu, nepoužívejte jehlu ani tupou kanylu pro přístup do šroubovacího ventilu.
- Tento výrobek by měli používat jen řádně kvalifikovaní profesionální zdravotníci.
- Neprovádějte opakovanou sterilizaci. Po použití jedné lahvičky celou sadu vyhoďte.
- Při opakovaném použití a čištění výrobku by mohlo dojít ke změně jeho konstrukčních a mechanických vlastností. To by mohlo způsobit infekci nebo jiné onemocnění/poranění.
- Výměnu a likvidaci výrobku provádějte v souladu se schváleným protokolem daného zařízení nebo s pokyny CDC.
- Společnost Poly Medicure Limited neodpovídá za žádné přímé, náhodné či následné škody vzniklé v důsledku opakovaného použití tohoto výrobku.


Obrázek 1

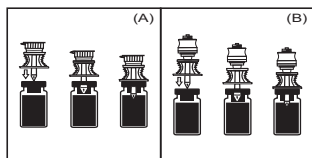


Obrázek 2

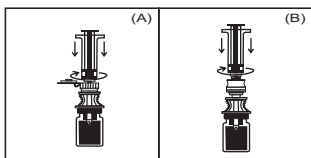

Obrázek 3

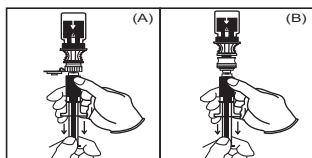

Obrázek 4

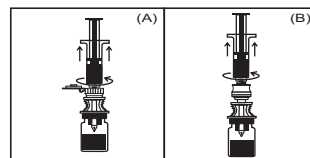

**POLY MEDICURE LIMITED**  
 Plot No. 115-116, Sector 59, HSIIDC Indl. Area,  
 Ballabgarh, Faridabad, Haryana 121004, INDIA  
 Customer Care No. : +91-129-4287053  
 E-mail : customercare@polymedicure.com  
 Web : www.polymedicure.com

**Dovozce: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.**  
 Sídlo: Juárezova 17, 160 00 Praha 6  
 Office: Novodvorská 136, 142 00 Praha 4  
 Česká republika

**EC REP** Obelis s.a.,  
 Boulevard Général Wahis 53,  
 1030, Brussels, BELGIUM.  
 Tel : +(32) 2. 732.59.54  
 E-mail : mail@obelis.net



Rev. 00-23/06

Note : IFU will be put inside the duplex box

Doc. No. PROMED/005-I	Date : 13-06-23	Design by	Checked by	Approved by
IFU Design of Polyspike	Size : 180x130mm	Designer	QA Person	QA Incharge
Color Break <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Specifications :			
Black	1.	Issue No. 01	Scale : 1:1	Sheet 1 of 1
Rev.	Amendment	Remarks	Date of Amdt.	