

vyschnout, předměty ponořte do roztoku a následně opláchněte čistou vodou. Tabletu položte na sifon, zalijte vodou a nechte působit co nejdéle. Pro zlepšení čistícího účinku lze kombinovat s neutrálními nebo mírně zásaditými detergenty. Nesměšujte s kyselinami.  
**Složení:** dichlorisokyanurát sodný 99%. Tableta o hmotnosti 2,72 g obsahuje 1,5g aktivního chlóru. **Obsah účinné látky ve 100 g přípravku:** 99 g dichloroisokyanurátu sodného, dihydrát CAS 51580-86-0. Skladujte a přepravujte v originálním obalu v suchu, temnu a chladu při teplotě -5°C až +30°C. První pomoc: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte čistou vodou. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody, dejte pít 1-2 sklenice vody. Při nadýchání vyved'te postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. Prázdné, čisté a uzavřené obaly po důkladném vypláchnutí předejte k recyklaci. Zbytky přípravku: viz bezpečnostní list. **Pouze pro profesionální použití.**



Varování

**CZ Obsahuje: Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát.** H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

Ecolab s. r. o. · Voctářova 2449/5, Libeň  
 180 00 Praha 8 · Czech Republic  
 Tel.: +420 296 114 040

www.ecolab.com

3039640F/19SEP19/CZ

ECOLAB®

# Medicarine



## CZ Dezinfekční přípravek ve formě tablet

- Na bázi aktivního chlóru
- Účinný proti bakteriím (vč. TBC, MRSA), houbám a virům (vč. HBV, HCV, HIV)
- Snadné použití, dobrá materiálová snášenlivost

3039640

300 tablet x 2,72 g

OBAL K  
 RECYKLACI  
 DOKONALE  
 VYPRAZDNIT



LOT



Oblast použití	Dávkování	Doba působení
Dezinfekce všech omyvatelných ploch a předmětů ve zdravotnictví, potravinářských, stravovacích a bytovacích zařízeních	2 tablety / 10 l vody	5 minut
Biologické znečištění (krev, hnis, výměšky)	1 tableta / 1,5 l vody	30 minut
Účinek na TBC ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> )	2 tablety / 10 l vody	30 minut
Účinek na MRSA	1 tableta / 10 l vody	5 minut
Virucidní dle EN 14476 ( <i>Adenovirus, Polyovirus</i> ) / vyšší biologická zátěž	1 tableta / 1,5 l vody	5 minut
EN 14476 účinek proti myšimu noroviru / vyšší biologická zátěž	1 tableta / 1,5 l vody	1 minuta
Sporicidní dle EN 13704 ( <i>Bacillus cereus, Clostridium difficile</i> )	1 tableta / 1,5 l vody	10 minut
Sporicidní dle EN 13704 ( <i>Bacillus subtilis</i> )	5 tablet / 1,5 l vody	10 minut
Fungicidní dle EN 13624 / vyšší biologická zátěž	5 tablet / 1,5 l vody	15 minut

**CZ Účel použití:** Přípravek je určen k dezinfekci všech typů omyvatelných povrchů a předmětů ve zdravotnictví, veřejném stravování, laboratořích, potravinářském průmyslu a objektových službách. Nanáší se setřením na vlhko nebo v ponorných lázních. Zejména vhodný k dezinfekci sanitárních zařízení z keramiky. U kovů doporučujeme před použitím vyzkoušet na skrytém místě odolnost materiálu. Všechny plochy a povrchy přicházející do styku s potravinami je nutné po použití přípravku důkladně opláchnout pitnou vodou. **Návod k použití:** viz tabulka. **Příprava pracovního roztoku:** Dezinfekční roztok připravte bezprostředně před použitím rozpuštěním příslušného počtu tablet ve studené vodě (max. 30°C). Po úplném rozpuštění tablet ve vodě je roztok připraven k použití. Plochy omyjte a nechte