

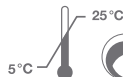
ECOLAB®**CITROclorex 2% MD****Zdravotnický prostředek
Orvostechnikai eszköz**

CZ Tekutý dezinfekční přípravek určený k okamžitému použití pro dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků, k dezinfekci vnějších součástí a povrchů centrálních i periferních venózních katetrů, které nejsou v přímém kontaktu s injekčními nebo tělními tekutinami.

Mezinárodní pokyny (viz doporučení v EPIC) doporučují použití alkoholového roztoku chlorhexidinu, který obsahuje 2% chlorhexidin diglukonátu a 70% isopropylalkoholu, což je poměr odpovídající složení přípravku CITROclorex 2% MD. Účinný proti bakteriím (včetně TBC), kvasinkám, obaleným virům a Rota virům.

HU Használatra kész fertőtlenítő folyadék nem invazív orvostechnikai eszközök felületéhez, valamint a központi és perifériás vénás katéterek külső részeinek fertőtlenítéséhez, amelyek nem érintkeznek injektáló vagy testfolyadékkal.

A nemzetközi EPIC iránymutatások alkohol-alapú oldat klórhexidinnel kombinált (2% klórhexidin és 70% izopropil-alkohol), például CITROclorex 2% MD, használatát javasolják. Hatékonyaság: baktericid (beleértve TB), yeasticid, továbbá hatékony burkos vírusok és Rota ellen.

**CE 0297****250 ml e****3074870**

25°C

**LOT****EXP****CZ** Obsahuje: Propan-2-ol.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. **Pouze pro profesionální použití.**

HU Tartalma: izopropanol. H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P210 Hőltől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P261 Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet beélegését. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Szemvédő/ arcvédő használatra kötelező. **Csak professzionális felhasználók részére.**

Ecobal Deutschland GmbH · Ecobal-Allee 1
40789 Monheim am Rhein · Germany
Tel.: +49 2173-599-0
Notfallrufrn.: +32-(0)3-575-5555

Distributed by: Ecobal s. r. o. · Votčářova 2449/5, Libeň · 180 00 Praha 8 · Czech Republic · Tel.: +420 296 114 040 / **Ecobal GBS Kft** · 81-83 Váci út · 1139 Budapest · Tel.: +36 1 880 5610 / **Ecobal GmbH** · Rivegare · Handelskai 92 · 1200 Wien · Tel.: +43 1 715 25 50-0

www.ecolab.com**Nebezpečí
Veszelý**

3074870F/25-JUN20/CZ



CZ Návod k použití: Neředěný produkt nastříkejte na gásu nebo hadřik. Povrch důkladně navlhčete a dbejte na dostatečné a rovnoměrné nanášení po celém povrchu. Nechte zaschnout a neoplachujte. **Varování:** produkt nesmí proniknout do vnitřních součástí katétru. V případě, že dezinfekční prostředek přijde do styku s vnitřními součástmi katétru, katétr zlikvidujte. Přípravek CITROclorex 2% MD je nekompatibilní s mýdly, čisticími prostředky obsahujícími aniontové povrchově aktivní látky, chloridy, uhličitany, hydrogenuhličitany nebo jiné anorganické soli, s paraformaldehydem a peroxidem vodíku. Přípravek CITROclorex 2% MD nepoužívejte k dezinfekci zdravotnických prostředků a pomůcek, které nejsou odolné vůči působení alkoholových roztoků. **Složení: Obsah účinných látek ve 100 g produktu:** 62 g isopropylalkohol (ekvivalent k 70% obj.), 2 g chlorhexidin diglukonát. **Pouze pro profesionální použití. Prázdné, čisté a uzavřené obaly předejte oprávněné osobě k zneškodnění. Zbytky produktu: viz bezpečnostní list.**

Účinnost (neředěný přípravek)	Doba působení
EN 13727 (baktericidní), čisté & nečisté podmínky	1 min
EN 13624 (účinnost proti kvasinkám), čisté & nečisté podmínky	
EN 16615 (baktericidní / účinnost proti kvasinkám), čisté & nečisté podmínky	5 min
EN 14348 (tuberkulocidní), nečisté podmínky	30 sec
EN 14476 (obalené viry), čisté & nečisté podmínky	15 sec
EN 14476 (Rota viry), čisté & nečisté podmínky	15 sec

HU Használati utasítás: Juttasson a CITROclorex 2% MD termékből egy gézlapra, vagy törölkendőre. Nedvesítse be a teljes felszínt alaposan. Hagyja meg száradni és ne öblítse le. **Figyelemztetés:** Kerülje el, hogy a termék a katéter belső részébe jusson. Amennyiben ez megtörténik a katétert kezelje hulladékként. Ne keverje anionos szappanokkal és tisztítószerekkel, kloridokkal, karbonátokkal, hidrogénkarbonátokkal és más szervetlen anionokkal, paraformaldehiddel és hidrogén-peroxiddal. Ne használja a CITROclorex2% MD-t olyan orvostechnikai eszközökön, amelyek nem kompatibilisek az alkoholos oldatokkal. **Összetevők: 100g a következő hatóanyagot tartalmazza:** 62 g izopropil-alkohol (70 térfogat%), 2 g klórhexidin-diglukonát. **Csak professzionális felhasználók részére. A csomagolást csak kiürített és lezárt állapotban szabad szemétkébe dobni. Termék maradványokkal kapcsolatban olvassa el a biztonsági adatlapot.**

Hatékonyasági vizsgálat (hígítatlan termék)	Behatási idő
EN 13727 (bactericid), előzetesen tisztított és szennyezett felület	1 min
EN 13624 (yeastacid), előzetesen tisztított és szennyezett felület	
EN 16615 (bactericid / yeastacid), előzetesen tisztított és szennyezett felület	5 min
EN 14348 (tuberculocid), szennyezett felület	30 sec
EN 14476 (Szelektív virucid hatás), előzetesen tisztított és szennyezett felület	15 sec
EN 14476 (Rota), előzetesen tisztított és szennyezett felület	15 sec