

# KOMPLEXOTVORNÝ DETERGENT PRO TERMICKÉ MYTÍ PODLOŽNÍCH MÍS V MYČKÁCH

## Anios LB 300

### KONCENTROVANÝ DETERGENT, PRO POUŽITÍ V TERMICKÝCH MYČÍCH LÁZNÍCH

- Alkalický detergent
- Rozptyluje vápenaté usazeniny
- Použitelný v jakékoli kvalitě vody
- Komplexotvorný účinek
- Bez obsahu EDTA a NTA
- Bez obsahu fosfátů



### VLASTNOSTI PRODUKTU

- Čirý až žlutý roztok
- pH koncentrovaného produktu při +20°C: cca 13,3
- pH zředěného roztoku při 0,1%\*: cca 11,1
- pH zředěného roztoku při 0,3%\*: cca 11,5
- Hustota (koncentrát) při +20°C: 1.096 g/ml
- Vodivost při 0,1% a 0,3%: 275 - 755 μS/cm
- Viskozita (koncentrát): 3,00 mPa/s

\*hodnota pH za provozních podmínek je vždy určena pomocí pH metru s teplotní kompenzací.

### BALENÍ A INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

VÝROBEK	VELIKOST BALENÍ	KÓD PRO OBJEDNÁNÍ
Anios LB 300	2 x 5 L kanistr	3103970

### OBLAST POUŽITÍ

Výrobek je určen na vyloučení a dispergování uhličitanu vápenatého pro středně tvrdou vodu. Zabraňuje usazování vodního kamene v zařízení a na zařízení. Kompatibilní s materiály dřezů a umyvadel, skleněnými, nerezovými a plastovými močovými lahvemi.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Koncentrovaný roztok pro profesionální použití. Ředění podle programu myčky podložních mís a tvrdosti vody (1 až 3 ml / litr).

### SLOŽENÍ

Sekvestrační činidlo v alkalickém prostředí.

### SKLADOVÁNÍ

Nebezpečí. Respektujte informace pro používání (vytvořené v souladu s evropskými pravidly pro klasifikaci a označování chemických směsí). Skladování: +5°C až +25°C.

### CERTIFIKÁTY

Certifikáty je možno poskytnout na požádání.

### POUŽÍVEJTE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK BEZPEČNĚ

Přečtěte si etiketu a informace o výrobku.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

# Anios LB 300



## Nebezpečí

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

## Prevence:

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.


## Opatření:

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.



 **LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distributor pro ČR:  
**ECOLAB s.r.o.**  
Voctářova 2449/5, Libeň  
180 00 Praha 8  
Česká republika

**ECOLAB**<sup>®</sup>

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)