

ALLEVYN® Ag Non-Adhesive



ALLEVYN® Neadhezivní krytí s antimikrobiální hydrocelulární pěnou

Pro středně až vysoce secernující rány. Krytí obsahuje sulfadiazin stříbrný.

Popis

ALLEVYN Ag Non-Adhesive je absorpční antimikrobiální třívrstvé krytí sestávající z následujících komponent: Absorpční hydrocelulární polštářek obsahující SSD (sulfadiazin stříbrný), vložený mezi perforovanou neadhezivní vrstvu pro kontakt s ránou a vodotěsnou vnější fólii. Krytí poskytuje účinnou bariéru proti mikrobiální kontaminaci, která chrání ránu před invazivními patogenními mikroorganismy, čímž napomáhá rychlejšímu hojení. SSD je účinný proti mikroorganismům přítomným v krytí i v ráně. V přítomnosti exsudátů krytí přispívá k udržení vlhkého prostředí rány.

Indikace

ALLEVYN Ag Non-Adhesive je antimikrobiální absorpční krytí pro péči při sekundárním průběhu hojení chronických i akutních ran s plnou tloušťkou, částečnou tloušťkou nebo mělkých ran s granuláční tkání, secernujících ran, jako jsou: dekubity, běrcové vředy, diabetické vředy, popáleniny, dárčovská místa, funginózní / maligní rány a rány s chirurgickou dehisencí. ALLEVYN Ag Non-Adhesive lze použít na infikované rány. Pokud se výrobek používá na infikované rány, tyto rány se musí ošetřit podle místního protokolu.

Kontraindikace

- Nepoužívejte u pacientů se známou přecitlivělostí na sulfadiazin stříbrný nebo sulfonamidy.
- Vzhledem k tomu, že o sulfonamidech je známo, že způsobují kernikterus, krytí ALLEVYN Ag Non-Adhesive se nesmí používat u žen, které jsou v období těhotenství nebo kojení nebo se k němu blíží, u předčasně narozených dětí nebo novorozenců během prvních měsíců života.

Bezpečnostní opatření

- Pouze k zevnímu použití.
- ALLEVYN Ag Non-Adhesive není kompatibilní s oxidačními činidly (např. EUSOL) nebo peroxidem vodíku, protože tyto látky mohou rozkládat absorpční polyuretanovou složku krytí.
- Krytí ALLEVYN Ag Non-Adhesive nemusí být kompatibilní s lokálními antimikrobiálními látkami.
- V případě klinické infekce lokální stříbro nenahrazuje potřebu systémové terapie nebo jiné adekvátní léčby infekce.
- Může dojít k zarudnutí kůže kolem rány. To může souviset s podrážděním křehké kůže nebo exsudátem z rány, který zůstává v kontaktu s normální kůží po delší dobu. Dojde-li k zarudnutí nebo senzibilizaci, přestaňte výrobek používat.
- Během elektronických měření, např. EEG a EKG, se vyvarujte kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely.

Dostupnost produktu

Kód	Rozměry	Dostupnost
66800082	5 cm x 5 cm	Krabice 10 ks
66800084	10 cm x 10 cm	Krabice 10 ks
66800087	15 cm x 15 cm	Krabice 10 ks
66800090	20 cm x 20 cm	Krabice 10 ks

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN Anglie.

*Ochranná známka společnosti Smith & Nephew

©Smith & Nephew Datum vydání 03/2020



Sterilizováno gama zářením
Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
Nepoužívejte opakovaně
Prostudujte si návod k použití
Uchovávejte v suchu (<25 °C)
Upozornění
Chraňte před slunečním světlem

ALLEVYN® Ag Non-Adhesive



ALLEVYN® Neleplná protimikrobná hydrocelulárna penasta obloga

Za rane z zmernim do močnim izločanjem. Obloga vsebuje srebrov sulfadiazin.

Opis

Neleplna obloga ALLEVYN Ag Non-Adhesive je spojna protimikrobná trislojna obloga, ki jo sestavljajo: Vpojna hidrocelularna blazinica, ki vsebuje SSD (srebrov sulfadiazin), vstavljena med perforirani nelepljiv sloj za stik z rano in vodoodporni zunanji film. Obloga zagotavlja učinkovito pregrado proti mikrobi kontaminaciji in ščiti rano pred invazivnimi patogenimi mikroorganizmi, s čimer pripomore k hitrejšemu celjenju. SSD je učinkovit proti mikroorganizmom, ki so prisotni v oblogi in rani. Ob prisotnosti eksudata obloga pomaga vzdrževati vlažno okolje rane.

Indikacije

ALLEVYN Ag Non-Adhesive je protimikrobná spojna obloga za oskrbo ran s sekundarnim celjenjem, kot so kronične in akutne, globoke, površinske ali plitve, granulacijske in eksudativne rane, ki vključujejo: razjede zaradi pritiska, venske razjede, diabetične razjede, opekline, darovalska mesta, fungoidne/maligne rane in kirurške razpre rane. ALLEVYN Ag Non-Adhesive se lahko uporablja na okuženih ranah. Kadar izdelek uporabljate na okuženih ranah, je treba rane zdraviti v skladu s lokalnim protokolom.

Kontraindikacije

- Ne uporabljajte pri pacientih z znano preobčutljivostjo na srebrov sulfadiazin ali sulfonamide.
- Za sulfonamide je znano, da povzročajo kernikterus, zato se neleplnih oblog ALLEVYN Ag Non-Adhesive ne sme uporabljati pri ženskah ob koncu ali v bližini konca nosečnosti oziroma v času dojenja, pri nedonošenčkih ali pri novorojenčkih in dojenčkih v prvih mesecih življenja.

Previdnostni ukrepi

- Samo za zunanjo uporabo.
- Neleplna obloga ALLEVYN Ag Non-Adhesive ni kompatibilna z oksidirajočimi sredstvi (npr. EUSOL) ali vodikovim peroksidom, saj lahko razgradijo vpojni poliuretanski sestavni del obloge.
- Neleplna obloga ALLEVYN Ag Non-Adhesive morda ne bo združljiva s topičnimi protimikrobnimi sredstvi.
- V primeru pojava klinične okužbe topično srebro ne nadomesti potrebe po sistemski terapiji ali drugem ustreznem zdravljenju okužbe.
- Lahko pride do pordelosti kože okoli rane. To je lahko povezano z draženjem občutljive kože ali posledica eksudata rane, ki daljša obdobja ostaja v stiku z normalno kožo. Če pride do pordevanja ali senzibilizacije, prenehajte z uporabo.
- Izogibajte se stiku z elektrodami ali prevodnimi geli med elektronskimi meritvami, npr. pri snemanju EEG ali EKG.

Razpoložljivost izdelkov

Koda	Velikost	Razpoložljivost
66800082	5 cm x 5 cm	10 v škatli
66800084	10 cm x 10 cm	10 v škatli
66800087	15 cm x 15 cm	10 v škatli
66800090	20 cm x 20 cm	10 v škatli

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN Anglija.

*Blagovna znamka družbe Smith & Nephew

©Smith & Nephew Datum izdaje 03/2020



Sterilizirano gama obsevanjem
Ne uporabljajte, Ni za ponovno uporabo če je embalaža poškodovana
Glejte navodila za uporabo
Hranite v suhem prostoru (< 25 °C)
Pozor
Zaščitite pred sončno svetlobo

Ko ALLEVYN Ag Non-Adhesive uporabljate pri pacientu med preiskavo z magnetnoresonančnim slikanjem (MR), se lahko pojavi občutek rahlega segrevanja.

- Neleplna obloga ALLEVYN Ag Non-Adhesive ni kompatibilna z izdelki na oljni osnovi, kakršen je vazelin.
- Neleplna obloga ALLEVYN Ag Non-Adhesive ni primerna za samostojno uporabo pri vrtlinskih ranah, vendar jo lahko uporabljate na vrtlinskih ranah kot sekundarno oblogo.
- Kot velja za vse izdelke, ki vsebujejo srebrov sulfadiazin, je treba poudariti naslednje previdnostne ukrepe, zlasti kadar z oblogo pokrivате predel z veliko površino:
 - Bodite previdni pri pacientih s pomembno jetrno ali ledvično okvaro.
 - Bodite previdni pri posameznikih z znanim pomanjkanjem glukoza-6-fosfat dehidrogenaze.
 - Lahko pride do spremenjenih učinkov sistemsko apliciranih zdravil. To lahko še zlasti velja za peroralne hipoglikemike in fenitoin. Ob uporabi teh zdravil je priporočljivo spremljati krvne koncentracije, saj lahko pride do okrepitev učinkov teh zdravil.

Navodila za uporabo

- Po potrebi morate rano očistiti v skladu z lokalnim kliničnim protokolom.
- Izberite oblogo, ki je večja od rane.
- Neleplno oblogo ALLEVYN Ag Non-Adhesive vzemite iz embalaže z uporabo aseptične tehnike.
- Belo stran obloge namestite na rano, tako da zagotovite dober stik, in oblogo pritrdite z obližem za zadrževanje obloge, trakom ali povojem.
- Za nerodne predele po potrebi obrežite.
- ALLEVYN Ag Non-Adhesive se lahko uporablja pod kompresijskimi obvezami. Oblogo odrežite na velikost rane, jo redno preverjajte in zamenjajte, če pride do prehajanja eksudata.
- Obveza lahko ostane nameščena do 7 dni, vendar jo je treba v primeru prehajanja eksudata zamenjati prej.

Pogostost menjavanja

V zgodnjih fazah oskrbe ran je treba neleplno oblogo ALLEVYN Ag Non-Adhesive pogosto pregledovati. Obloge lahko nedotaknjene ostanje nameščene do 7 dni ali dokler eksudat ne postane viden in se približa razdalji 1,5 cm od roba obloge, kar koli nastopi prej. Upoštevati je treba tudi lokalne klinične protokole.

Odstranitev obloge

Če želite oblogo ALLEVYN Ag Non-Adhesive odstraniti, odstranite zadrževalno oblogo ali povoj in dvignite oblogo od rane.

Merilna skala na vrečki služi samo kot vodilo za pomoč pri izbiri obloge in treba je paziti, da se izognete navzkrižni kontaminaciji.