

SECURA[®] NO-STING BARRIER FILM

Nedráždivý bariérový film SECURA[®] je prostředek pro ochranu kůže v tekuté formě. Po aplikaci tvoří film, který minimalizuje pocit štípání.

SECURA

- Rychle zasychá během 30 sekund.^{1,2}
- Má nedráždivé^{3,4} složení bez alkoholu, které snižuje pocit štípání na poraněné pokožce.^{4,5}
- Neobsahuje latex ani konzervační látky, nearomatický.^{4,6}
- Vytváří účinnou bariéru po dobu až 96 hodin (4 dny).⁷

K dispozici ve 3 sterilních formách:

- Sprej – praktické a snadné použití. Každou lahvičku lze v průměru použít na 235 aplikací.⁸
- Tampón – díky aplikátoru je zajištěna čistá a přesná aplikace.
- Ubrousek – nákladově efektivní forma.

Ochrana pokožky

Chrání neporušenou, ale i poraněnou pokožku před podrážděním:^{7,9}

- od moči a stolice při inkontinenci,
- od tělesných tekutin,
- od traumat způsobených lepidlem na fixačních prostředcích,
- od poškození třecí silou, např. u polohování.

Chrání také celistvost pokožky před traumatem během odstraňování samolepících pásek a adhezivních prostředků.⁹ Prostředek lze používat u donošených dětí od 1. měsíce věku.

Vodotěsná, prodyšná a průhledná bariéra

Tento ochranný prostředek tvořící film po aplikaci zajišťuje efektivní, vodotěsnou⁷ a prodyšnou bariéru. Je průhledný, bezbarvý a umožňuje tak jasně vidět kůži, případně okolí rány.

Prodlužuje dobu, po kterou je možné ponechat krytí aplikované na kůži.

Nedráždivý bariérový film Secura může prodloužit dobu, po kterou lze ponechat krytí na kůži*. Díky tomu, že zajišťuje efektivní bariéru a ochranné rozhraní na místech pokožky, na která se upevňují drenážní hadičky, externí katetry, stomické prostředky a jiná adhezivní krytí, prodlužuje jejich životnost. Film lze používat s běžnými typy lepidel, včetně akrylátu.

*Nesmí se překročit doba ponechání krytí na kůži uvedená v pokynech nebo na etiketě výrobku.

Snadno se aplikuje a odstraňuje

Snadno se aplikuje na nerovných površích, jako jsou lokty, kolena a paty. Po aplikaci se přizpůsobuje pohybu těla, nepraská a neodlupuje se.

Lze ho snadno odstranit prostředky k odstranění náplastí. V ráně nebo kolem ní nezůstávají zbytky.

Objednací informace

Kód pro objednání	Popis	Balení	Počet ks v balení
66800710	SECURA No-Sting Barrier Film sprej	28 ml / sprej	1
66800711	SECURA No-Sting Barrier Film tampóny	3 ml / tampón	50
66800712	SECURA No-Sting Barrier Film ubrousky	1 ml / ubrousek	50



Smith & Nephew GmbH
Concorde Business Park 1/C/3
2320 Schwechat, Austria
www.smith-nephew.com
CR_SECURA_1_2013

© Smith & Nephew 2013
Ochranná známka Smith & Nephew

Distributor:
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novodvorská 136
142 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 221 595 111
www.promedica-praha.cz

Zdroje:

1. Time-To-Dry Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
2. Tactile Characterization (Stickiness) Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
3. An Evaluation of Health Care Products on Children 0-36 Months of Age w/ Normal Skin. Report 09-129700-111, Hilltop Research, 2010.
4. Formulations: SECURA No-Sting Barrier Film Spray and SECURA No-Sting Barrier Film Wipe/Swab
5. Assessing the Sting Potential of Film Forming Barriers. Rpt # 09-60, Cyberderm Clinical Studies, 2009.
6. Odor Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
7. Study to Compare the Wash-Off Resistance and Durability of a Barrier Film. Rpt # 09-58A, Cyberderm Clinical Studies, 2009.
8. No-Sting Barrier Spray Mean Spray Content Test. SAP 2010.
9. Skin Protectant Barrier Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.

OPSITE[®] SPRAY

Voděodolný, transparentní a rychleschnoucí film se snadnou a pohodlnou aplikací

OPSITE Spray je průhledný a rychleschnoucí tekutý obvaz, který se snadno a pohodlně aplikuje. Tenká vrstva pomáhá chránit suché chirurgické a povrchové rány. OPSITE Spray je permeabilní pro vodní páru a vzduch, umožňuje okolní pokožce dýchat a tím zabraňuje maceraci kůže.

Výhody

Voděodolný

Postižená oblast kůže se může snadno omývat, aniž by se narušil tekutý obvaz rány.

Pohodlný a elastický

Tenká vrstva zůstane neporušena i na místech, která jsou pohyblivá nebo flexibilní jako např. na kloubech.

Indikace

OPSITE Spray se používá na různé malé suché rány, obzvláště je vhodný na:

- řezné rány malého rozsahu, odřeniny a popáleniny,
- suché rány po šití,
- zakrytí vnější ortopedické fixace, jako např. Steinmannova hřeb, nebo
- po vyjmutí stehů,
- přes místa očkování,
- přes neporušené puchýře,
- fixaci kožního štěpu .

Opatření

Nevdechujte. Používejte v dobře odvětraných prostorách. Vyhněte se kontaktu s očima. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavý materiál. Nádobka je pod tlakem: chraňte před přímým sluncem a nevystavujte teplotám přes 50°C. Nepropichujte nebo nepalte ani po spotřebování obsahu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určen pro použití s medicínskými přípravky. Pouze pro vnější použití. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení. Zákaz kouření. Při použití s jodovým roztokem a překrytím okluzivním obvazem může dojít k zčervenání kůže. Při použití na místa přenosu kožních štěpů je nezbytně nutné ponechat adekvátní místa přenosu bez spreje a umožnit tak dostatečný odtok seromu.

Návod k použití

Aplikace

Sprej před použitím překlopte a stříkejte na určené místo stejnoměrně ze vzdálenosti nejméně 15 cm. Pro dosažení lepšího výsledku vytvořte aplikací spreje několik tenkých vrstev.

Odstranění

Krytí lze po úplném zaschnutí sloupnout nebo nechat samovolně rozložit. Možné je také odstranění za pomoci odstraňovače náplastí.

Kontraindikace

Nepoužívejte s plastovými intravaskulárními zařízeními. Nepoužívejte u dětí do 18 měsíců.

TENTO VÝROBEK NEBSAHUJE ŽÁDNÉ CHLORO-FLUORO-KARBONOVÉ PROPELANTY.



Objednací informace

Kód pro objednání	Popis	Počet ks v balení
66004978	100 ml	1
66004980	240 ml	1

Wound Management www.smith-nephew.com
Smith & Nephew
Medical Ltd
101 Hessle Road
Hull HU3 2BN
England

T 44 (0) 1482 2251 81
F 44 (0) 1482 328326