

BACTIGRAS[◇] antiseptické krytí s chlorhexidin acetátem účinné proti *MRSA in-vitro*

BACTIGRAS je gázová mřížka napuštěná jemným parafínem obsahujícím 0,5% chlorhexidin acetát BP. BACTIGRAS se dodává sterilní a prokládaný pro snadnou aseptickou aplikaci. Chlorhexidin je osvědčené antiseptikum účinné proti široké řadě grampozitivních bakterií a proti některým gramnegativním bakteriím, včetně MRSA. Při používání krytí se neprojevila žádná rezistence a alergie je extrémně vzácná.



BACTIGRAS se doporučuje používat jako nepřilnavou kontaktní vrstvu na rány, které jsou, nebo by mohly být infikovány. Na již infikované rány lze BACTIGRAS použít spolu se systémovou ATB terapií. Obvazy jsou dostupné v řadě praktických velikostí a lze je snadno stříhat i s proloženými listy. BACTIGRAS je jemný a nepřilnavý a umožňuje volnou pasáž exudátu.

Indikace

- Menší popáleniny a opařeniny
- Lacerace, odřeniny a jiné rány se ztrátou kůže
- Odběrové plochy, kožní štěpy
- Bércové vředy

Kontraindikace

BACTIGRAS se nesmí používat při známé přecitlivělosti nebo alergii na chlorhexidin.

Balení

Každý obvaz BACTIGRAS (včetně role) je sterilní a je zabalen v samostatném obalu.

Bezpečnostní opatření

BACTIGRAS se nesmí používat na rány pokrývající více než 10% povrchu těla.

Výjimečně se může objevit dermatitida, přecitlivělost na dotyk nebo na světlo.

Byla zaznamenána anafylaktická reakce na chlorhexidin, ale vyskytuje se vzácně.

Zamezte kontaktu s očima, středním uchem, mozkovou plenou a mozkiem.

BACTIGRAS nelze použít spolu s mýdly, jinými aniontovými materiály a také s jodidem draselným. Je třeba se vyhnout použití obvazu BACTIGRAS s oxidačními prostředky na čištění ran a použití superoxidovaných roztoků.



Objednací údaje

Kód	Velikost	Obsahuje
7456	5cm x 5cm	50 Obvazů
7457	10cm x 10cm	10 Obvazů
7461	15cm x 20cm	10 Obvazů
66007505	15cm x 1m	1 Role