

NÁVOD K POUŽITÍ

POLYSWAB 70% IPA (Dezinfekční uzávěr 70% IPA)

POUŽITÝ MATERIÁL:

HDPE, PU, IPA

INDIKACE:

Dezinfekční uzávěr Polyswab je určen k použití na bezjehlových ventilech jako dezinfekční čisticí prostředek před připojením k infuzním hadičkám a jako ochranný kryt v době mezi připojeními. Tento prostředek provádí dezinfekci bezjehlových ventilů jednu minutu po aplikaci a chrání je před kontaminací mezi jednotlivými připojeními až po dobu sedmi dnů, pokud nedojde k odpojení.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Zkontrolujte neporušenost ochranného obalu prostředku Polyswab.
2. Odlopněte ochranný film od proužku.
3. Jednou rukou přidržíte bezjehlový ventil a současně kruhovým pohybem po směru hodinových ručiček zatlačte Polyswab na ventil.
4. Zkontrolujte, zda je Polyswab pevně našroubován a zda je bezjehlový ventil pevně nasazen. V případě potřeby dotáhněte.
5. Když potřebujete dezinfekční uzávěr Polyswab odpojit, pevně uchopte bezjehlový ventil a otáčivým pohybem proti směru hodinových ručiček Polyswab vytáhněte.
6. Po odpojení dezinfekčního uzávěru Polyswab vyhodte.
7. Zkontrolujte, zda je bezjehlový ventil pevně připevněn ke katétu.

Varování a výstražná upozornění:

1. Při opakovaném připojování vždy dodržujte nemocniční protokol pro dezinfekci bezjehlového ventilu.
2. Prostředek musí být připojen k bezjehlovému ventilu nejméně po dobu 1 minuty a může zůstat připojen až 7 dnů, pokud nebude odpojen.
3. Nepoužívat opakovaně.
4. Tampon vyhodte do běžného odpadu.
5. Po použití prostředek vyhodte.
6. Před použitím si přečtěte návod. Výrobek by se měl používat dle pokynů v návodu.
7. Nepoužívat, pokud je obal poškozený nebo otevřený.
8. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek nebo jeho obal nejsou poškozeny, a také zkontrolujte datum spotřeby.
9. Po otevření jednotlivého balení výrobek ihned použijte.
10. Neprovádějte resterilizaci. Po jednom použití celou sadu vyhodte.
11. Společnost Polymedicure Limited neodpovídá za žádné přímé, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku opakovaného použití výrobku.
12. Nepoužívat, pokud je pečeť výrobku poškozena, utržena nebo prorážena nebo pokud houba uvnitř výrobku vypadá suchá.
13. Při opakovaném připojování vždy dodržujte nemocniční protokol pro dezinfekci bezjehlového ventilu.
14. Pokud je bezjehlový ventil silně znečištěn, očistěte jej před použitím prostředkem tamponem navlhčeným v 70% izopropylalkoholu.
15. Použijte nejdříve do data spotřeby uvedeného na obalu.
16. Při odpojování použijte obě ruce a dbejte na to, aby nedošlo k nechtěnému odpojení bezjehlového ventilu.



Pozor (výstraha)



Čtěte návod k použití



Katalogové číslo



Nepoužívat opětovně



Neprovádět opětovnou sterilizaci



Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno



Kód dávky



Datum výroby



Použit do data



Sterilní fluidní cesta; sterilizováno ozářením



Evropský autorizovaný Zástupce



Výrobce



Fluidní cesta apyrogenní



5°C - 35°C

Omezení teploty



Chránit před slunečním zářením



Chránit před vlhkem

POLYMED
MEDICAL DEVICES

POLY MEDICURE LTD.
Plot No. 34, Sector 68, IMT, Faridabad-121004
(Haryana), INDIA

EC REP Obelis s.a.,
Boulevard Général Wahis 53,
1030, Brussels, BELGIUM.
Tel : +(32) 2. 732.59.54
E-mail : mail@obelis.net

CE
0123

Rev. 00-21/12