



PINMED

— quality is everything —

STERILE EO



CE 0123

Vzduchovod Guedel

NÁVOD NA POUŽITÍ

Položky:

PM07035000x Vzduchovod Guedel

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Odstraňte fólii z balení, vyjměte vzduchovod.
2. Umístěte vzduchovod do ústní dutiny.
3. Nechte pacienta pevně zakousnout do bukalní části vzduchovodu.

VAROVÁNÍ:

1. Pouze na jedno použití.
2. Žádná překážka uvnitř dýchacích cest.
3. Skladujte na suchém a chladném místě.



SKLADOVÁNÍ:

Składujte na chladném, tmavém a suchém místě, teplota by neměla přesáhnout 49°C, bez korozivního plynu a s dobrým větráním.

POUZE NA JEDNO POUŽITÍ

Výrobek by měl být použit pouze jednou a u jednoho pacienta. Mytí nebo opakovaná sterilizace je vyloučena. Opětovné použití výrobků nese potenciální nebezpečí jak pro pacienta, tak pro uživatele. Zhoršení vlastností materiál a nedostatečná sterilita spojená s takovým opětovným využitím může vest k nemoci, poškození, nebo k smrti pacienta.

Ningbo PINMED Instruments Co., Ltd.
Adresa: Room(22-1)(22-2), No.455, East Zhongshan Road, Yinzhou
District, 315040 Ningbo, Čínská lidová republika

Lotus NL B.V.
Adresa: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Nizozemsko.

Dovozce: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Sídlo: Juárezoava 17, 160 00 Praha 6
Office: Novodvorská 136, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno v Číně

Datum vystavení: 16.3.2020



PANTONE 375 C



PANTONE 355 C



70% PANTONE Process Black C