



NÁVOD K POUŽITÍ

StopBac STERILE Kompres je hypoalergenní antibakteriální sterilní kryt ran nové generace k jednorázovému ošetření drobných poranění i hlubších ran. Aktivní zóna polštářku využívá unikátních nanotechnologických řešení a obsahuje mj. aktivní ionty stříbra. Vedle kvalitního krytí rány a jejího okolí tak poskytuje vysoce účinnou antibakteriální ochranu, tedy razantně redukuje výskyt bakterií a brání průniku vnější bakteriální infekce. Zásadním omezením rizika vzniku sepse tak náplast StopBac významně přispívá k lepšímu zhojení poranění.

Vysoce kvalitní materiály náplasti StopBac poskytují účinné a komfortní krytí rány. Polštářek má značnou absorpční kapacitu, díky své struktuře je však dostatečně prodyšný a neuvolňuje do rány žádná vlákna. Aktivní zóna polštářku zajišťuje antibakteriální účinek po celou dobu aplikace, nezávisle potvrzený řadou laboratorních testů.

Účel použití: Jednorázové ošetření – krytí drobných poranění i hlubších, špatně se hojících ran.

Návod k použití: Po důkladném vyčištění případně desinfekci rány vyjměte z obalu a ihned přiložte na osušené postižené místo. Aktivní zóna polštářku by měla být v přímém kontaktu s poraněním, aby byla zajištěna jeho dlouhodobá ochrana s maximálním antibakteriálním účinkem. Pro fixaci použijte sekundární krytí obvazem (neadhesivní). Po použití výrobek odložte do k tomu určených nádob.

Složení: Polštářek je vyroben z netkané textilie a upraven patentovanou antibakteriální nanovrstvou obsahující stopová množství stříbra, které efektivně působí proti bakteriím v místě poranění a tím podporuje a urychluje hojení ran. Mírná barevná změna polštářku nemá vliv na funkci výrobku.

Rozměry a balení: Výrobek je dodáván v rozměrech 7,5 x 7,5 cm, 10 x 10 cm, 10 x 15 cm, 12 x 12 cm, 15 x 15 cm, 17 x 22 cm a v baleních po 1, 3 a 5 ks – viz obal (štítek).

Upozornění: V případě poškození nebo silného znečištění obalu výrobek nepoužívejte.
Určeno k jednorázovému použití, neresterilizovat.
Neužívat vnitřně, nepolykat.
Nepoužívejte v případě alergie na stříbro. V případě alergické reakce přerušete užívání.
Výrobek není určen k použití s léčivými a jinými zdravotnickými prostředky.
Uchovávejte v suchu, mimo přímého slunečního záření a dosah zdrojů tepla.
Doporučená teplota skladování je od 5 do 25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Spotřebujte do: viz obal

Datum poslední revize návodu k použití: 08-2020

V případě dotazů či nahlášení nežádoucích příhod kontaktujte výrobce:



1014



Grade Medical s.r.o.

Mníšecká 500, 252 30 Řevnice

E-mail: hlaseni@stopbac.cz, web: <http://www.stopbac.cz>

Vyrobena v České republice.

STERILEEO

Sterilní (etylenoxid).



Čtěte návod k použití



Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.



Určeno k jednorázovému použití



Skladujte v suchu



Nevystavujte přímému slunečnímu záření.



Uchovávejte při teplotách od 5 do 25 °C.



Spotřebujte do (viz dno krabičky)

LOT

Číslo šarže



Neresterilizovat.